



HITNO OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI NA TERENU

PRIMALAC	Direktor operativne sale i za upravljanje materijalima
VRSTA POSTUPKA	Dobrovoljno OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI NA TERENU
REFERENTNI BROJ/ DATUM	ASP03/2013/27. mart 2013. godine
PROIZVOD	STERRAD 200 REF 10201, REF 10202 STERRAD 100NX REF 10104
RAZLOG	<p>Svrha ovog saopštenja je da Vas obavesti o tome da je kompanija Advanced Sterilization Products (ASP) utvrdila da STERRAD[®] 100NX[®] i STERRAD[®] 200 Sistemi za sterilizaciju mogu emitovati miris ili smrad u okruženje koji nije tipičan za normalne uslove rada.</p> <p>U skladu sa pritužbama koje je ASP dobio od klijenata, neki zdravstveni radnici su prijavili smrad/mirise za koje postoji mogućnost da potiču iz STERRAD[®] 100NX[®] i STERRAD[®] 200 Sistema. Premda se mirisi/smradi osećaju u okruženju zdravstvene institucije, mirisi/smradi mogu takođe biti dovedeni u vezu sa normalnim razlaganjem nafte koju koristi vakuum pumpa sterilizatora STERRAD[®] 100NX[®] i/ili STERRAD[®] 200. ASP istražuje ovo pitanje da bi odredio izvor smrada/mirisa; međutim, ukoliko osetite ovo stanje, molimo Vas da poštujuete korake navedene u odeljku „Postupak” u daljem tekstu.</p>
POSTUPAK	<ul style="list-style-type: none">• Molimo vas podelite ovu informaciju sa svakim članom Vašeg osoblja koji radi sa ili u blizini vašeg STERRAD[®] 100NX[®] i/ili STERRAD[®] 200 Sistema.• Ukoliko primetite napred navedene uslove, osoblje treba da napusti salu kao mera predostrožnosti i da prestane sa upotrebom STERRAD[®] Sistema sve dok taj sistem ne bude servisiran. Osoblje treba da izbegava da radi u toj prostoriji sve dok miris/smradi ne nestane. Kontaktirajte [ubaciti kontakt informacije lokalnih profesionalnih servisa].• Neka ovo obaveštenje bude na snazi sve dok ASP ne servisira vaš STERRAD[®] 100NX[®] i/ili STERRAD[®] 200 Sistem.• Čuvajte primerak ovog saopštenja sa vašim STERRAD[®] 100NX[®] i/ili STERRAD[®] 200 Sistemom. <p>Vaš predstavnik prodaje vam stoji na raspolaganju da pruži pomoć u skladu sa ovim dobrovoljnim obaveštenjem o bezbednosti na terenu ukoliko zatražite pomoć.</p>
DALJI PRENOS INFORMACIJE	Upoznajte odgovarajuće osoblje Vaše institucije sa sadržajem ovog pisma.
KONTAKT	<p>Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim postupkom, molimo Vas da kontaktirate svog predstavnika prodaje ili pozovite [ime filijale].</p> <p>Izvinjavamo se za svaku nelagodnost koju će Vam ovo izazvati, ali budite uvereni da je naša krajnja namera da učinimo ovaj proces što je moguće lakšim.</p>
POTVRDA	O ovom postupku su obaveštene odgovarajuće regulatorne vlasti.